

# DEEP SHOOT

— Hair Loss Revolution —

La livraison directe à l'épiderme de principes actifs soigneusement sélectionnés ralentit et prévient la chute des cheveux grâce à une nutrition du cuir chevelu améliorant son état et stimulant la croissance capillaire.





# UN PROGRAMME SPÉCIALEMENT CONÇU QUI PRÉVIENT ET SAUVE LA CHUTE DES CHEVEUX.

DEEP SHOOT HAIR LOSS est un cocktail multi-fonctionnel contenant de la biotine, des facteurs de croissance, des PDRN (polydésoxyribonucléotides), des molécules d'acide hyaluronique, 14 peptides et 17 acides aminés permettant de (re)vitaliser le cuir chevelu afin d'améliorer son état et de stimuler la croissance capillaire.



Une solution simple,  
sûre et efficace



# BÉNÉFICES & AVANTAGES


- La biotine favorise la production de kératine et améliore la croissance des follicules.
- Les facteurs de croissance et les récepteurs de l'adénosine A2 aident à faciliter une récupération plus rapide du cycle de régénération.
- La vitamine C améliore l'absorption des ions permettant une croissance des cheveux plus saine et plus forte.
- Les acides hyaluroniques hydratent et nourrissent l'état du cuir chevelu en fournissant un environnement fondamental pour la prolifération des cellules ciliées.

**DEEP SHOOT**  
— Hair Loss Revolution —

V O T R E T R A I T E M E N T  
M É S O C O I F F U R E



A V A N T

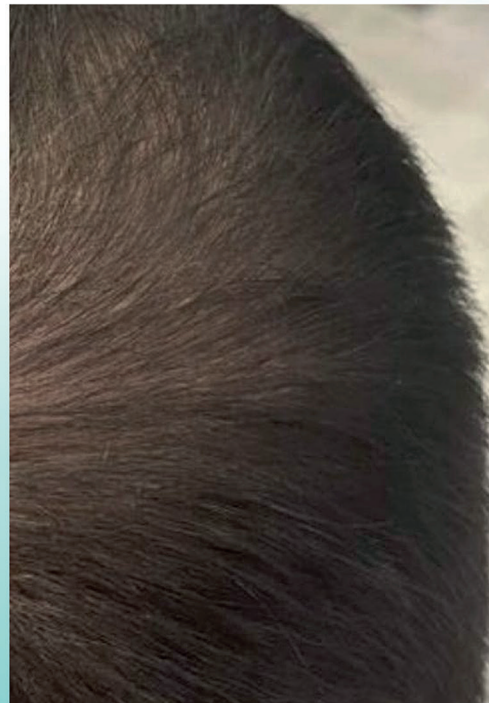

A P R È S \*

\* Après 8 séances

# TRAITEMENT

L'utilisation la plus courante du DEEP SHOOT HAIR LOSS se fait avec Turtlepin® III, un dispositif de livraison de solution multibroches de qualité médicale, qui permet au sérum d'être doucement estampée sur le cuir chevelu.


## TURTLEPIN® III

Le Turtlepin® III est un système d'injection qui bénéficie d'une technologie révolutionnaire. Contrairement aux aiguilles creuses classiques utilisées en mésothérapie esthétique, le Turteplin® est un système multi-aiguilles dont les caractéristiques techniques sont uniques.




Redéfinissant les standards de l'industrie, celui-ci a en effet l'avantage d'offrir des résultats aussi efficaces qu'indolores. Pour y parvenir, le Turtlepin® se construit sur les atouts suivants:

- Un lot de 19 aiguilles réparties de façon homogène
- Une gauge (volume disponible à l'intérieur d'une aiguille creuse pour permettre aux fluides d'y circuler) d'un calibre exceptionnellement petit
- Un angle de pénétration optimal
- Une longueur limitée à 0,5 mm très exactement

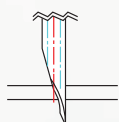

0,5 mm

Pénétration dans l'épiderme supérieur

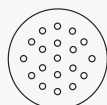


2x

Angle optimal pénétration efficiente



19 aiguilles

Homogénéisation de la répartition des aiguilles

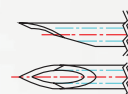

32g


Aiguilles hypodermiques de jauge exceptionnelle



Ces caractéristiques garantissent de manière générale:

- Une pénétration maximale pour une minimisation du caractère invasif (le taux de pénétration des principes actifs est de 15 fois celui des autres systèmes d'aiguilles et 30 fois plus que les applications topiques en moyenne)
- Une diffusion «éclair» (la diffusion des principes actifs se fait environ 20 fois plus rapidement)

0,5 mm

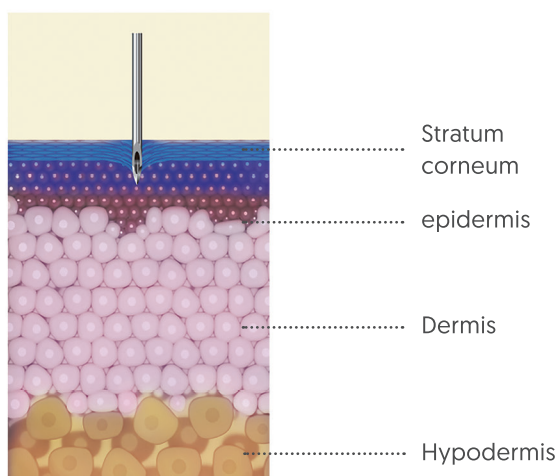

Une application se résume aux 2 étapes suivantes :

- Positionner l'applicateur selon un angle de 90° part rapport à l'épiderme
- Presser avec le pouce ou l'index sur la tête du piston afin de procéder à la perforation des tissus et à l'application des principes actifs au travers des micro-canaux créés par la perforation






# PROGRAMMES

Il est possible de définir 4 types de programmes, chacun adapté aux problèmes les plus courants que sont:

- 1 L'alopecie androgénétique en «M»  
[cycle de traitement masculin]
- 2 L'alopecie androgénétique en «O»  
[cycle de traitement masculin]
- 3 La chute de cheveux autour d'une ligne de répartition  
[cycle de traitement non généré]
- 4 L'alopecie aerata en «pelade»  
[cycle de traitement non généré]

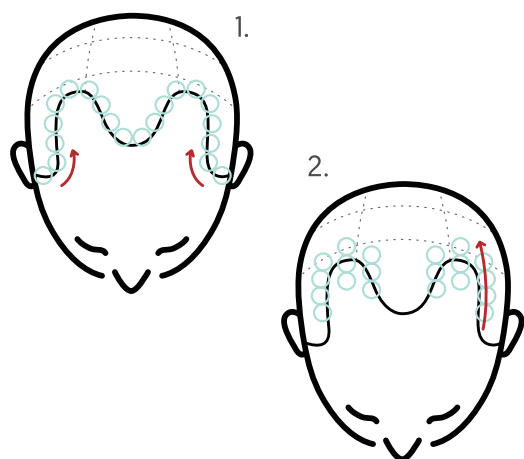


## PROGRAMME 1

Intervention sur une alopecie androgénétique en « M ».

1. Tamponnez le long de la ligne du cuir chevelu en commençant par la zone temporelle et en rejoignant le milieu du front.
2. Occupez-vous d'abord de la partie gauche du cuir chevelu [sur la base d'une séparation dessinée le long du visage sur l'arête centrale]. Tamponnez en suivant la direction indiquée.




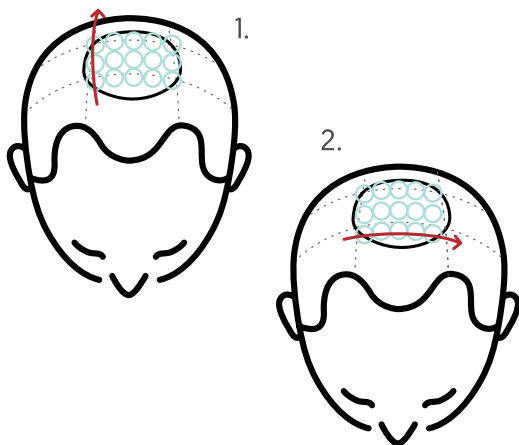

## PROGRAMME 2

Intervention sur une alopecie androgenetique en «O».


1. Divisez la zone ciblée de façon verticale pour un traitement en plusieurs sessions. Tamponnez alors en suivant la direction indiquée.
2. Répétez cette démarche en choisissant cette fois-ci un axe horizontal, là encore pour effectuer un traitement en plusieurs sessions. Tamponnez donc de nouveau en suivant la direction indiquée

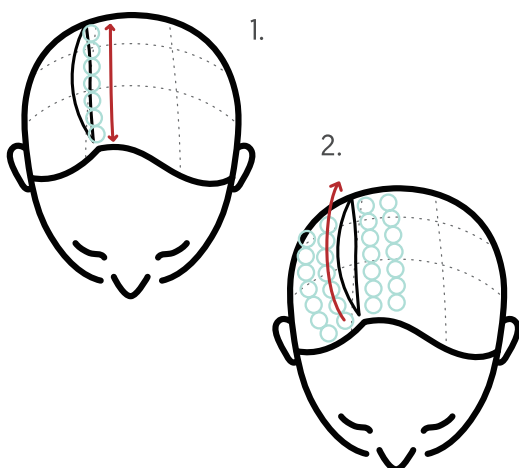

## PROGRAMME 3

Intervention sur une alopecie areata [pelade]

1. Identifiez clairement la ligne de répartition et tamponnez en la suivant.
2. Créez de nouvelles partitions de chaque côté de ladite ligne et tamponnez en suivant la direction indiquée.

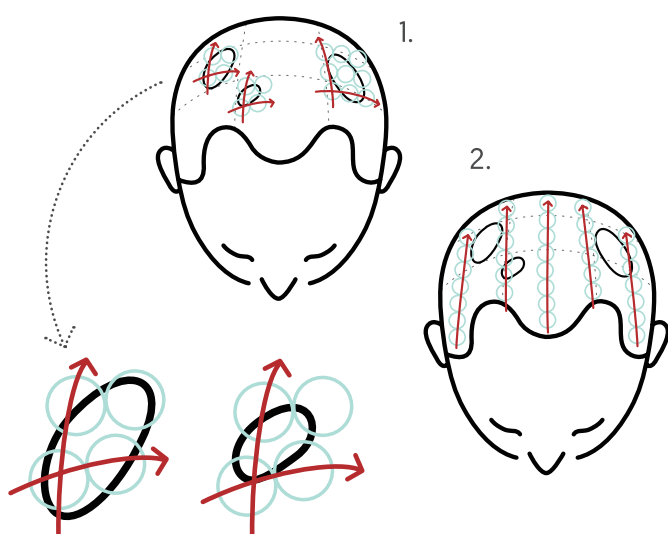

## PROGRAMME 4

Intervention sur une chute de cheveux autour d'une ligne de répartition

1. Segmentez la zone ciblée suivant deux directions [horizontale et verticale] puis tamponnez en suivant les directions indiquées.
2. Identifiez cinq parties différentes réparties dans des zones stratégiques [une au milieu et deux de chaque côté] et tamponnez en couvrant l'intégralité du cuir chevelu.



# CYCLES DE TRAITEMENT

Il est recommandé d'effectuer un cycle initial de 8 séances, espacées de 7 à 10 jours l'une de l'autre. Puis 2 séances après 1 mois finaliseront le résultat.

Régulation des maladies du cuir chevelu (dermatite seborrhéique) pellicules et démangeaisons.




Atténuation de la réduction folliculaire dégénérative et de la perte de cheveux causée par le trouble du cuir chevelu.




Augmentation du follicule anagène et réduction significative du follicule dégénératif.



Apparition d'une pousse de cheveux à partir du follicule anagène.

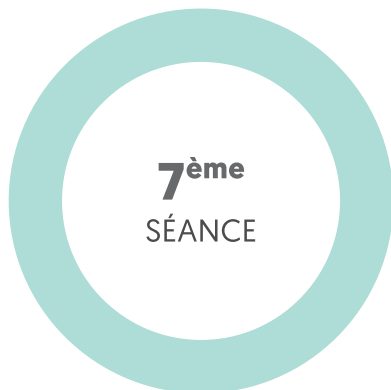

Apparition d'une pousse de cheveux abondante à partir du follicule anagène.

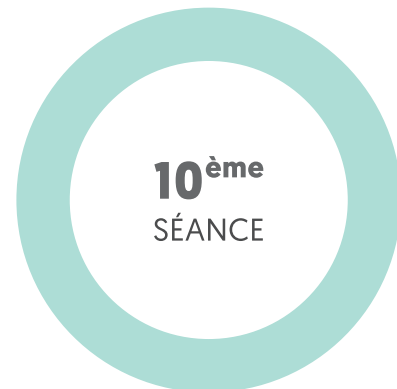



## COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE DE TRAITEMENT DEEP SHOOT HAIR LOSS?

La procédure dure généralement de 15 à 30 minutes, ce qui en fait un traitement très rapide et pratique.

## COMBIEN DE SÉANCES DE TRAITEMENT SONT NÉCESSAIRES ?

Un total de 10 séances est nécessaire: les 8 premières sont à espacer de 7 à 10 jours. Puis 2 séances d'entretien, respectivement après 1 et 2 mois, assurera un maintien optimal.

Afin d'entretenir le résultat sur le long terme, 3 à 4 séances par année sont recommandées.



# DANS COMBIEN DE TEMPS COMMENCERAI-JE À VOIR DES RÉSULTATS ?

La plupart des patients commencent à constater des résultats après avoir suivi les 8 séances du protocole thérapeutique.





Nous sommes à votre disposition  
Contactez-nous !

Dealhair SA  
Route des Ilettes 13B  
1869 Massongex

Téléphone : +41 21 960 17 38

E-mail : [info@dealhair.ch](mailto:info@dealhair.ch)

